



3-WARSTWOWA MASKA MEDYCZNA m-c24

Maski trzywarstwowe będące wyrobem medycznym spełniające wymogi normy EN 14683:2019 + AC2019 wykonane są z włókniny polipropylenowej, dodatkowej warstwy filtrującej, elementu usztywniającego oraz dwóch gumek mocujących.

Instrukcja użytkowania masek m-c24:

1. Wyjąć maskę z opakowania.
2. Po wyjęciu maski z opakowania nie odkładać jej na miejsce, które mogłoby zanieczyścić wyrób medyczny.
3. Maskę nakładać na twarz w taki sposób, by jej element usztywniający znajdował się na wysokości nosa, a kolor biały maski skierowany został w stronę skóry twarzy użytkownika, natomiast gumki zostały założone za uszami.
4. Po założeniu maski na twarz należy ją odpowiednio wyregulować w taki sposób, by całkowicie zakryła zarówno usta, brodę, jak i nos. Wokół nosa lub pod brodą nie powinno być żadnych szczelin, które pozwoliłyby powietrzu i kroplom ominąć czynnik filtrujący.
5. Maski nie mogą być noszone pod nosem ani zwisać na szyi.

Należy pamiętać, że:

Skuteczność filtracji i zdolność ochronna maski maleje, gdy staje się ona mokra, podarta lub przemieszczona. Im wyższa wartość ochrony maski, tym dłużej będzie ona utrzymywać filtrację, jednak brak jest ustalonej reguły dotyczącej czasu noszenia maski, ponieważ zależy ona od poziomu wilgotności, szybkości oddychania, wydzieliny z nosa, mówienia itp.

Maskę należy wymienić po przyjęciu każdego pacjenta lub odbycia wizyty.

W przypadku zamoczenia, zabrudzenia lub uszkodzenia maski należy ją niezwłocznie wymienić.

Sposób przechowywania maski:

Produkt powinien być przechowywany w czystych i suchych warunkach, w temperaturze od - 5°C do + 35°C, w maksymalnej wilgotności względnej wynoszącej <80%. Podczas przechowywania lub transportowania produktu należy korzystać z jego oryginalnego opakowania.

Skażone produkty powinny być utylizowane jako odpady niebezpieczne, zgodnie z krajowymi przepisami.

Czas składowania wynosi 30 miesięcy od daty produkcji.

Producent:

WKM

ul. Brodowicza 11/2, 31-518 Kraków



Tel. +48 12 378 32 77

Tel. kom. +48 531 944 542

Fax. +48 12 376 46 31

E-mail: bok@wkm-medical.com.pl

www.wkm-medical.com.pl

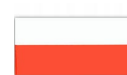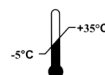

TERAZ POLSKA